



SISTEMI DI ASPIRAZIONE 24 ORE

Pulizia e aspirazione orale Q-Care®

Per i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica

Aspirazione e rimozione del biofilm + maggiore aderenza al protocollo.

Pratiche confezioni q4° e q8° per l'igiene orale completa per 24 ore.

Spazzolare i denti per
60 secondi



- Una confezione intuitiva illustra ogni fase dell'igiene orale per favorire un facile adattamento al protocollo q4° o q8° in uso.
- Pronti per l'igiene orale in meno di 10 secondi.
- Lo spazzolino da denti aspiratore aiuta a rimuovere il biofilm (placca) e le secrezioni orali. Il **tampone aspiratore** aiuta a rimuovere i detriti e le secrezioni tra uno spazzolamento e l'altro. Entrambi puliscono e rinfrescano meccanicamente grazie al bicarbonato di sodio, stimolando al tempo stesso i tessuti orali.
- La valvola di facile utilizzo azionabile col pollice (6404-X) consente un agevole controllo dell'aspirazione. L'**impugnatura di aspirazione** (6808-X) offre un controllo variabile dell'aspirazione e consente la sostituzione rapida degli strumenti.
 - Le bustine apribili con la semplice pressione delle dita rilasciano la soluzione detergente direttamente nella confezione, pertanto non è necessaria alcuna miscelazione.
- L'idratante orale lenisce e idrata le labbra e i tessuti orali, grazie alla vitamina E e all'olio di cocco.

Disponibile anche in confezione 6808-X:

- La cannula di Yankauer inguainata a punta morbida aiuta a rimuovere i detriti e le secrezioni. La guaina protegge il dispositivo tra un uso e l'altro.
- Il catetere di aspirazione orofaringeo morbido e flessibile aiuta a rimuovere le secrezioni dal distretto orofaringeo sopra le corde vocali.